

INSTRUCCIONES NACE PARA CLÍNICAS Y CENTROS DE EXTRACCIÓN



Paso 1: Contacte con nosotros

Llame al 900 849 300 o contacte con nosotros por email nacespain@igenomix.com

- Pida más información del test NACE
- Solicite el test
- Solicite la recogida



Paso 2: Recepción del Kit

Revise el contenido del Kit y asegúrese de que contiene:

- Tubo STRECK (verifique la fecha de caducidad)
- Formulario de Solicitud del test y Consentimiento Informado
- Envase secundario de plástico (envase de seguridad del tubo)
- Bolsa de plástico de retorno (courier)



Paso 3: Toma de la muestra

Notas importantes:

- Sólo a partir de la semana 10 de embarazo.
- Contacte con nosotros 1) si la paciente está en tratamiento de heparina de bajo peso molecular, 2) ha realizado una transfusión de sangre (<60 días), 3) le han realizado ransplante de médula osea, 4) padece cancer, 5) se observa la presencia de un gemelo evanescente.
- Los siguientes casos pueden suponer la no aceptación de la muestra por parte de nuestro laboratorio:
 - Las muestras que no vayan acompañadas de la documentación (formulario solicitud y el consentimiento informado).
 - La documentación (formulario solicitud y el consentimiento informado) no se ha cumplimentado correctamente.
 - Los campos obligatorios, identificados en los formularios con un asterisco (*), no se encuentran cumplimentados.
 - La ausencia de la firma del paciente y del médico solicitante en el formulario de solicitud y consentimiento informado.

Toma de muestra:

- Tubo STRECK: Volumen de muestra (sangre materna) entre 7ml (mínimo) y 10ml (máximo). Las muestras con volumen inferior al mínimo indicado y/o en tubos distintos a los proporcionados por Igenomix (Tubo STRECK), podrán suponer la no aceptación de las muestras por parte de nuestro laboratorio.
- Tras la extracción, mezcle el contenido inmediatamente invirtiéndolo suavemente de 8 a 10 veces.

Después de la toma de muestra:

- No congelar el tubo una vez tomada la muestra.
- Etiquete el tubo con los siguientes datos identificativos (opción 1 u opción 2):
 - Iniciales de la paciente o nombre completo y fecha de nacimiento o
 - Iniciales de la paciente o nombre completo y número de historia clínico

Un etiquetado incorrecto del tubo puede suponer la no aceptación de la muestra por parte de nuestro laboratorio.

- Coloque el tubo STRECK dentro del envase secundario, e introdúzcaloen el Kit. Doble y sitúe el consentimiento informado y el formulario de solicitud, previamente firmados y cumplimentados, y sitúe en el Kit. A continuación, coloque el tubo y los documentos dentro de caja Kit suministrada. Posteriormente introducir caja dentro del sobre del Courier suministrado.

- Si el envío de la muestra no se realiza inmediatamente después de la toma, conserve la muestra en nevera (nunca en congelador) a 4°C hasta el envío.

INSTRUCCIONES NACE PARA CLÍNICAS Y CENTROS DE EXTRACCIÓN



Paso 4: Transporte de la muestra

- Las muestras pueden enviarse a temperatura ambiente o refrigeradas (no enviar congeladas).
- Se recomienda utilizar el Kit o caja proporcionado por Igenomix para el retorno de la muestra.
- Cuando se superen los 35°C, deberán tomarse medidas adicionales en el envío para evitar la degradación de la muestra. Se recomienda realizar el envío con un par de acumuladores de frío dentro. En caso de dudas, por favor, contacte con nuestro departamento de atención al usuario.



Paso 5: Recogida de la muestra

Para que la estabilidad de la muestra no se vea comprometida, se recomienda realizar las recogidas en los siguientes intervalos. En caso de dudas, contacte con nosotros.

Recogidas en España:

- De Lunes a Viernes.
- Para coordinar la recogida de muestras se precisa de un margen de tiempo de 3 horas.

Recogidas en EU y otros países:

- Consultar disponibilidad con el departamento de atención al cliente.
- Para coordinar la recogida de muestras se precisa de un margen de tiempo de 24 horas.
- Verifique que la bolsa de retorno del Courier contiene una etiqueta adhesiva UN3373 o Exempt Human Specimen en un lugar visible.

Festivos: Los días anteriormente indicados pueden verse modificados por festivos. En dichos casos se le comunicará previamente a la recogida los días disponibles desde nuestro departamento de atención al cliente.

Se recomienda realizar el envío de muestras, a la mayor brevedad posible, con el fin de garantizar la calidad de la muestra.



Paso 6: Resultados del test

Igenomix enviará los resultados del test al Doctor. Los resultados del test estarán disponibles en **3 días laborables (NACE), 6-10 días laborables (NACE24), 10 días laborables (NACE24 Extended)** desde la recepción de la muestra en Igenomix.



Información adicional

Para la recogida de la muestra o información adicional

 900 849 300

 nacespain@igenomix.com