

INSTRUCCIONES POC



Paso 1: Contacte con nosotros

Llame al 963 905 310 o contacte con nosotros por email supportspain@igenomix.com

- Pida más información del test POC
- Solicite el Kit
- Solicite la recogida



Paso 2: Recepción del Kit

Revise el contenido del Kit y asegúrese de que contiene:

- Un Tubo EDTA* para la recogida de sangre (verifique la fecha de caducidad)
- Una Bolsa Biohazard para depositar en su interior los tubos de recogida de las muestras de sangre y restos fetales. (Verifique la fecha de caducidad)
- Un recipiente estéril para la recogida de restos fetales** (verifique la fecha de caducidad)
- Formulario de Solicitud del test y Consentimiento Informado
- Bolsa de plástico de retorno (courier)
- Precizará disponer de solución salina estéril para lavar los tejidos (no incluida en el Kit)

* **Nota:** En caso de no recibir o no disponer de tubo para la extracción de sangre, se podrá utilizar un tubo EDTA de 5ml con tapón morado. Si existen complicaciones para la toma de muestra de sangre, se podrán enviar las muestras por separado, pero dentro de la misma semana.

****Nota:** Se entiende por restos fetales los siguientes elementos:

- Saco gestacional vacío.
- Abortos involuntarios diferidos.
- Restos fetales expulsados espontáneamente y recogidos en casa.
- Muestras obtenidas mediante legrado o histeroembrioscopia.
- Restos fetales de gestaciones múltiples. En estos casos es indispensable utilizar kits independientes para cada feto con una sola muestra de sangre materna.
- Muestras recogidas en cualquier momento de la gestación.

Nota: Es preferible la realización del test sobre muestras obtenidas mediante legrado o histeroembrioscopia.



Paso 3: Toma de la muestra

Notas importantes:

Los siguientes casos pueden suponer la no aceptación de la muestra por parte de nuestro laboratorio:

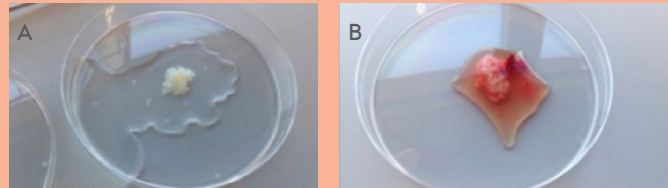
- o Las muestras que no vayan acompañadas de la documentación (formulario solicitud y el consentimiento informado).
- o La documentación (formulario solicitud y el consentimiento informado) no se ha cumplimentado correctamente.
- o Los campos obligatorios, identificados en los formularios con un asterisco (*), no se encuentran cumplimentados
- o La ausencia de la firma del paciente y del médico solicitante en el formulario de solicitud y consentimiento informado.

INSTRUCCIONES POC

Toma de muestra:

- Tome una muestra de tejido de tamaño mínimo 3x3 mm. (Es preferible una muestra pequeña pero limpia, sin sangre, antes que una muestra de mayor tamaño).
- Retire de la muestra de tejido los coágulos grandes de sangre.
- Use una solución salina estéril para lavar los tejidos (no incluida en el Kit).
- Tome como referencia la imagen adjunta donde se muestra el aspecto de las vellosidades de la decidua en un tejido limpio (ver imagen A) y el aspecto de una muestra hemática (ver imagen B). En un tejido recogido en buenas condiciones, la decidua parece rosa, es densa, y con aspecto de hoja. Las vellosidades cuando se enjuagan bien tienen tendencia a flotar y con un aspecto más blanco y con plumas en comparación con la decidua.
- A continuación, coloque el tejido en el recipiente con suficiente solución salina como para cubrir la muestra. En el caso de toma de muestra por histeroembrioscopia, depositar el tejido en tubo cónico de 10ml en solución salina estéril (tubo no incluido en Kit).
- Selle todos los recipientes/tubos con parafilm o similar.
- No congelar los restos fetales una vez tomada la muestra.
- Asegúrese de extraer 4ml de sangre de la madre antes o después de la obtención de los restos fetales. Extraer la sangre en el tubo EDTA para evitar su coagulación.

En aquellos casos en los que no se disponga de Kit y sea necesario realizar el legrado, los restos fetales se podrán depositar en un recipiente estéril (por ejemplo, un recipiente para análisis de orina -puede adquirirse en cualquier farmacia-) y cubrirlos con solución salina estéril. Tener la precaución de cerrar bien el recipiente para su envío.

**Después de la toma de muestra:**

Etiquete el tubo de EDTA y recipiente/tubo con los restos fetales utilizando los siguientes datos identificativos (opción 1 u opción 2):

- Iniciales de la paciente o nombre completo y fecha de nacimiento o
- Iniciales de la paciente o nombre completo y número de historia clínico

Un etiquetado incorrecto de recipientes/tubos puede suponer la no aceptación de la muestra por parte de nuestro laboratorio.

• Introduzca el recipiente/tubo con la muestra de POC y el tubo EDTA de sangre materna en el interior de la bolsa Biohazard disponible para ello.

• Doble y sitúe el consentimiento informado y el formulario de solicitud, previamente firmados y cumplimentados, y sitúe en el Kit. Posteriormente introducir caja dentro del sobre del Courier suministrado.

**Paso 4:**
Transporte de la muestra

- Enviar las muestras a temperatura ambiente (no enviar congeladas).
- Se recomienda utilizar el Kit o caja proporcionado por Igenomix para el retorno de la muestra.
- Cuando la temperatura exterior supere los 35°C, deberán tomarse medidas adicionales en el envío para evitar la degradación de la muestra. Se recomienda introducir un acumulador de frío, evitando en todo momento la congelación del tejido. En caso de dudas, por favor, contacte con nuestro departamento de atención al usuario.
- Si el envío de las muestras (restos abortivos y sangre) se realiza dentro de las 24 horas desde la extracción de la muestra, conserve los restos abortivos con la solución salina estéril y el tubo de sangre, a temperatura ambiente.
- Si el envío de las muestras (restos abortivos y sangre) no se realiza dentro de las 24 horas desde la extracción de la muestra, consérvelos en nevera entre 4-8°C hasta el momento del envío.

INSTRUCCIONES POC



Paso 5: Recogida de la muestra

Para que la estabilidad de la muestra no se vea comprometida, se recomienda realizar las recogidas en los siguientes intervalos. En caso de dudas, contacte con nosotros.

*Recogidas en España:

-De Lunes a Viernes.

-Para coordinar la recogida de muestras se precisa de un margen de tiempo de 3 horas.

*Recogidas en EU y otros países:

-Consultar disponibilidad con el departamento de atención al cliente.

-Para coordinar la recogida de muestras se precisa de un margen de tiempo de 24 horas.

-Verifique que la bolsa de retorno del Courier contiene una etiqueta adhesiva UN3373 o Exempt Human Specimen en un lugar visible.

*Festivos: Los días anteriormente indicados pueden verse modificados por festivos. En dichos casos se le comunicaría previamente a la recogida los días disponibles desde nuestro departamento de atención al cliente.

Se recomienda realizar el envío de muestras, a la mayor brevedad posible, con el fin de garantizar la calidad de la muestra.



Paso 6: Resultados del test

Igenomix enviará los resultados del test al Doctor que ha prescrito el test.

Los resultados del test estarán disponibles en un plazo de **12 días laborables** desde la recepción de la muestra en Igenomix.



Información Adicional

Para la recogida de la muestra o información adicional:

 **963 905 310**

 **supportspain@igenomix.com**